

Note de service

BQ-Problème de réactifs défectueux pour les appareils à gaz du sang de type ABL90

ENTÊTE RÉSERVÉE : MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Nouvel examen* | ☐ Manuel de prélèvement* | ☒ Autre : Réactifs défectueux |
| ☐ Arrêt de réalisation d'un examen* | ☐ Changement organisationnel* | |
| ☐ Modification de méthode/analyse* | *Cocher la case correspondante | |

Objet : Problème de réactifs défectueux pour les appareils à gaz du sang de type ABL90
A compter du 23/10/2023

Nous rencontrons actuellement de grosses difficultés en terme de qualité des packs réactifs et cassettes nécessaires à la réalisation des gaz du sang sur les appareils de type ABL90.

Il existe en effet des défauts qualitatifs récurrents sur ces packs et cassettes amenant à effectuer des changements fréquents et imprévisibles, l'erreur sur le pack et/ou la cassette nécessitant un changement de celui-ci même si le nombre de tests théoriques réalisables est encore élevé. Ces défauts qualitatifs se traduisent également par une durée de stabilisation prolongée pour certains paramètres, en particulier glucose et lactate, pouvant conduire à l'indisponibilité de l'appareil pendant plusieurs heures. Cette situation est complètement indépendante de notre volonté.

Après échange avec la société Radiometer qui nous a confirmé l'existence de défauts au niveau des consommables produits actuellement, plusieurs propositions nous ont été faites afin de limiter l'impact de ces anomalies sur le fonctionnement de vos appareils. Nous allons tester ces solutions qui ne sont cependant pas curatives.

Une étude interne est en cours au sein du siège de la Société mais le problème n'est pas résolu.

Pour faire face à cette situation, nous vous demandons :

- **De bien vouloir respecter la période de stabilisation de l'appareil et de ne pas utiliser celui-ci pendant cette période.**
- **De bien vouloir signaler rapidement à l'équipe de biologie délocalisée un éventuel dysfonctionnement, notre équipe mettra tout en oeuvre pour vous dépanner le plus rapidement possible en fonction des disponibilités des packs. En cas d'indisponibilité, la procédure dégradée (FT-05073 EBMD-Procédure dégradée en cas de panne d'un analyseur à Gaz du sang délocalisé dans un service clinique du CHRU) est à appliquer.**

Nous mettons tout en oeuvre pour que cette situation soit la plus brève possible mais restons toutefois tributaires de l'avancée des investigations menées par Radiometer.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions de votre compréhension.

Fait à Nancy le **23/10/2023**,

Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l'analyse
Marie Toussaint, responsable de la Biologie Délocalisée

Patricia Franck, cheffe du Pôle de Biologie Biopathologie

DESTINATAIRES
Pour information : ▪ Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution : ▪ Président de CME ▪ Les prescripteurs du CHRU ▪ Direction des soins ▪ Les CSS, Les CS du CHRU